


SZYBKA KONFIGURACJA DMS PRO

Oprogramowanie Eversense®DMS Pro jest przeznaczone dla placówek medycznych. Niniejszy dokument wyjaśnia, jak szybko skonfigurować pojedyncze konto DMS Pro dla całej placówki. Jeżeli z oprogramowania korzysta w placówce wielu użytkowników, należy skorzystać z innej metody konfiguracji. Pełne instrukcje zawiera Przewodnik użytkownika systemu zarządzania bazą danych (DMS) Pro (eversensediabetes.com).

➤ Krok 1: Rejestracja w systemie DMS Pro

- Przejdź na stronę globalpro.eversensedms.com.

Kliknąć opcję **Sign Up (Zarejestruj się)**.

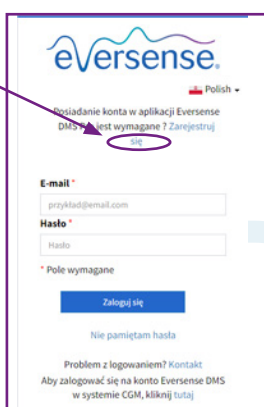

➤ Krok 2: Zamówienie konta Eversense DMS Pro (ciąg dalszy)

- Aby do systemu Eversense DMS Pro dodać pojedynczych pracowników medycznych placówki, należy zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika systemu zarządzania bazą danych (DMS) Pro.
- Dla konta Eversense DMS Pro i osobistego konta Eversense DMS nie można użyć tego samego adresu e-mail.

➤ Krok 2: Zamówienie konta Eversense DMS Pro

Uzupełnić formularz, podając informacje dotyczące swojej placówki.

- W polach „First Name” (Imię) i „Last Name” (Nazwisko) zaleca się podanie nazwy placówki lub głównego pracownika medycznego danej placówki. (Te informacje zobaczą pacjenci, którzy udostępnią dane).
- Z rozwijanej listy „Title” (Tytuł) wybrać odpowiednią pozycję, a następnie uzupełnić pozostałe wymagane pola.



Gdy formularz będzie już uzupełniony, kliknąć przycisk **Submit (Prześlij)**.

➤ Krok 3: Odebranie dwóch wiadomości e-mail

- Potwierdzenie rejestracji konta.
- Zatwierdzenie utworzenia konta (może to potrwać do 24 godzin). Aby dokończyć aktywację konta, należy kliknąć łącze* znajdujące się w wiadomości e-mail. Następnie dane konta należy zapisać w poniższej ramce.

Nazwa placówki:

E-mail:

Hasło:

ID placówki: (patrz Krok 4)


Łącze wygasa po **72 godzinach**. Po tym czasie można poprosić o wysłanie nowej wiadomości e-mail.



SZYBKA KONFIGURACJA DMS PRO

➤ Krok 4: Logowanie do konta DMS Pro placówki


Przydzielone ID placówki znajduje się w górnej części strony.

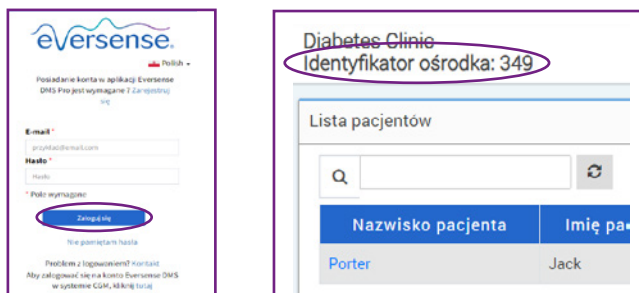


Uwaga: Numer placówki będzie pacjentom potrzebny podczas wnioskowania o udostępnianie swoich danych z systemu CGM placówce.

➤ Krok 5: Zapraszanie pacjentów do placówki

- Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknąć opcję **Pacjent** (Pacjent), a następnie pozycję **Invite Patient** (Zaprosz pacjenta).

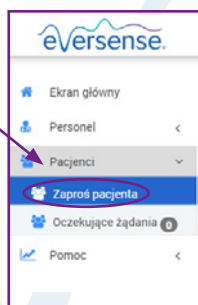

- Wprowadzić adres e-mail Eversense pacjenta (adres użyty podczas konfigurowania aplikacji mobilnej i zakładania konta Eversense).
- Kliknąć przycisk **Search Eversense** (Szukaj w Eversense).

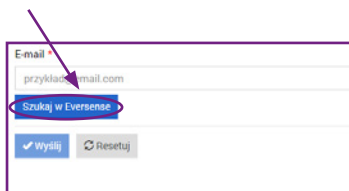


System Ciągłego Monitorowania Glukozy (CGM) Eversense® E3 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru glukozy przez okres do 180 dni u osób chorych na cukrzycę które ukończyły 18 lat. System jest zarejestrowany do podejmowania decyzji terapeutycznych. Pomiar glikemii za pomocą glukometru we krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca jest wymagany tylko w celu kalibracji, od 21 dnia stosowania systemu 1 x dziennie. Pomiarzy z użyciem glukometru powinny być wykonane w sytuacji kiedy objawy nie odpowiadają wskazaniom sensora lub w przypadku przyjmowania leków z grupy tetrazyklin. Procedura implantacji i usuwania sensora wykonywana jest przez lekarza posiadającego w tym zakresie uprawnienia. System Eversense E3 CGM można zakupić na stronie diabetyk24.pl.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie <https://global.eversensediabets.com/safety-info>.

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring i logo Eversense są znakami towarowymi firmy Senseonics, Incorporated. Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy wnioskować ani sugerować żadnych związków ani poparcia.

➤ Krok 5: Zapraszanie pacjentów do placówki (ciąg dalszy)

Jeżeli adres e-mail pacjenta jest zarejestrowany, zostanie wyświetlone poniższe pole. Podać wszystkie wymagane informacje, a następnie nacisnąć przycisk **Send** (Wyślij). Do pacjenta zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem.

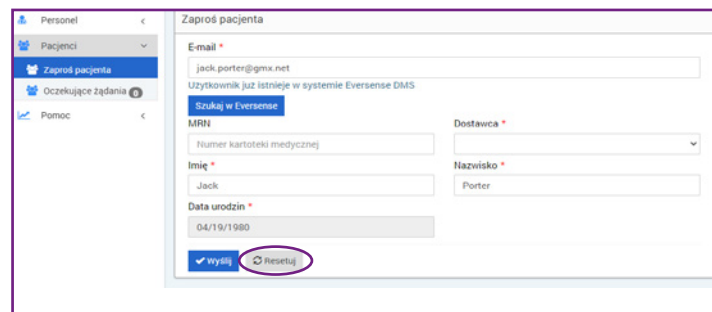

Uwaga: Jeżeli podany adres e-mail nie jest zarejestrowany w bazie Eversense DMS, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Należy skontaktować się z pacjentem i upewnić, jakiego adresu e-mail użyto podczas konfigurowania konta.

Po przyjęciu zaproszenia przez pacjenta symbol ✓ pod kolumną Data Share (Udostępnianie danych) zmieni się na ✗. Aby wyświetlić raporty dotyczące pacjenta, należy kliknąć jego nazwisko.



Uwaga: Pacjenci mogą wnioskować o udostępnienie swoich danych. Oczekujące wnioski pacjentów są widoczne w lewym pasku nawigacji. Należy kliknąć kolejno opcje **Patients > Pending Requests** (Pacjenci > Oczekujące wnioski).



Dodatkowe informacje i wsparcie w zakresie oprogramowania Eversense DMS Pro można uzyskać, zaglądając do Przewodnika użytkownika systemu zarządzania bazą danych (DMS) Pro, kontaktując się z przedstawicielem medycznym systemu Eversense lub kontaktując się z działem obsługi klienta Eversense pod numerem telefonu i adresem:

+48 22 372 72 20, wew.4 (pon.-pt., 9:00-17:00) / eversense.pl@ascensia.com



DYSTRYBUTOR:
ASCENSIA DIABETES CARE POLAND Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa, Polska
eversense.pl@ascensia.com



PRODUCENT:
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301.515.7260 | global.eversensediabets.com

© 2022 Senseonics, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.