

Łatwy i szybki sposób udostępniania pomiarów glikemii lekarzowi

Zostań użytkownikiem aplikacji CONTOUR® DIABETES i połącz się zdalnie ze swoim lekarzem*

1

Pobierz aplikację CONTOUR® DIABETES



Pobierz bezpłatnie



Pobierz w App Store

POBIERZ Z Google Play

Lista urządzeń współpracujących z aplikacją, dostępna jest na stronie: <http://compatibility.contourone.com>

2

Utwórz konto



3

Sparuj kompatybilny glukometr CONTOUR®



Więcej informacji można znaleźć na stronie: diabetes.ascensia.com

Prosta rejestracja umożliwiająca lekarzowi zdalną analizę Twoich wyników

Poczekaj na zaproszenie od lekarza

zaproszenie e-mail lub zaproszenie za pomocą kodu QR

Odbierz e-mail z zaproszeniem i kliknij w link*

The screenshot shows the 'Dodaj nowego Pacjenta' form with the 'Podaj dane' tab selected. It includes fields for 'Imię' and 'Nazwisko', a 'Kraj' dropdown menu set to 'Polska', and an 'Opcjonalne' section with a checked checkbox for 'Chcę wysłać zaproszenie e-mail do tego pacjenta' and an 'Adres e-mail' field. A blue 'Dodaj nowego Pacjenta' button is at the bottom.

*Lekarz/Pielęgniarka zainicjuje zaproszenie



Bezpłatna Infolinia:

800 999 090

(czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)

infolinia@ascensia.pl

www.diabetes.ascensia.pl

1 Zeskanuj kod QR wygenerowany podczas wizyty

The screenshot shows the 'Dodaj nowego Pacjenta' form with the 'Kod QR' tab selected. A large QR code is displayed in the center of the form.

2 Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do aplikacji CONTOUR®DIABETES

The screenshot shows the login screen for the Contour app. It has tabs for 'Pacjent' and 'Lekarz/Pielęgniarka'. The 'Lekarz/Pielęgniarka' tab is active. It includes a 'Contour' logo, a text prompt 'Aby zalogować się na swoje konto, użyj danych logowania Contour Cloud.', an 'Adres e-mail' field, a 'Hasło' field with a 'Zapomniałeś hasła?' link, and a 'Zapamiętaj mnie' checkbox. A blue 'Zaloguj się' button and a 'Nie masz konta? Zapisz się' link are at the bottom.

3 Uzupełnij swoje dane



Teraz Twoje wyniki pomiarów glikemii są dostępne dla lekarza za pośrednictwem platformy GlucoContro.online